

「置ける」手すり たよレール シリーズ

段差に置くだけ 簡単設置

たよレール dan

上がりかまちの昇降を安全にサポートします。

たよレールdanは 3タイプ

かまち高さ90～500mmには
ハイツタイプ

かまち高さ90～360mmには
ロータイプ

ベースプレートが小さめ
省スペースタイプ

CONTENTS


ハイツタイプ	2
ロータイプ	3
省スペースタイプ	4
関連商品	5
組合せTAISコード一覧	6
設置例	7
その他特長	裏表紙



⚠️ ご注意

- 片手すりの場合、手すりは壁側に取付けてください。(省スペースタイプをのぞく)
- たよレールシリーズは他社製品と組合せたり、連結したりしないでください。
- 定期点検(モニタリング時)を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
- たよレールシリーズをご利用になる前に付属されている『取扱説明書』を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。



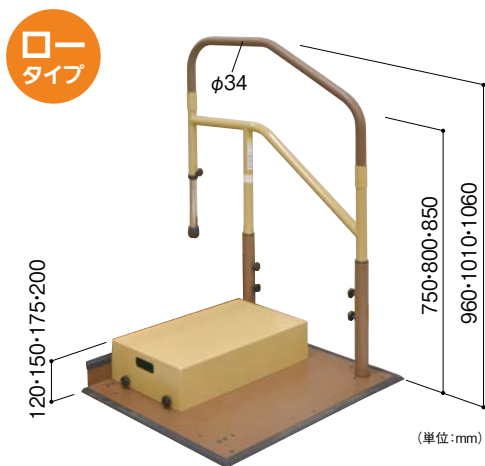


ロータイプ 共通仕様

- 踏み台無** ■上がりかまち高さ90~360mmまで対応
踏み台付 ■上がりかまち高さ130~360mmまで対応
 ■踏み台高さ120~200mm ※4段階調整(120・150・175・200)

BZD-05~08 共通仕様

- 材質: 手すり/被膜)ウッドパウダー混合半硬質樹脂(芯材)アルミ、手すりフレーム/スチール焼付塗装、支柱・ベース/スチール焼付塗装、踏み台/スチール焼付塗装
- 色: 手すりフレーム/キャメルイエロー、手すり支柱/ダークブラウン、ベース部/ダークブラウン、踏み台/キャメルイエロー

■手すりカラー

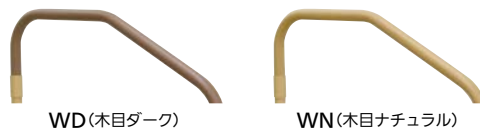

たよレールdan 高さ調整対応表

(単位:mm)

支柱	土間側	上がりかまち側						かまち高さ
		90	140	180	240	300	360	
ロータイプ	下段	750	870	820	780	720	—	手すり高さ
	中段	800	920	870	830	770	710	—
	上段	850	—	920	880	820	760	700

○ロータイプの上がりかまち高さ対応は最大で360mmまでとなります。




このマークのついている商品は「スマホでデモ機」でバーチャル設置をお試いただけます。

スマホでデモ機 WebAR 対象商品



ロータイプ BZD-05WD/WN

貸与

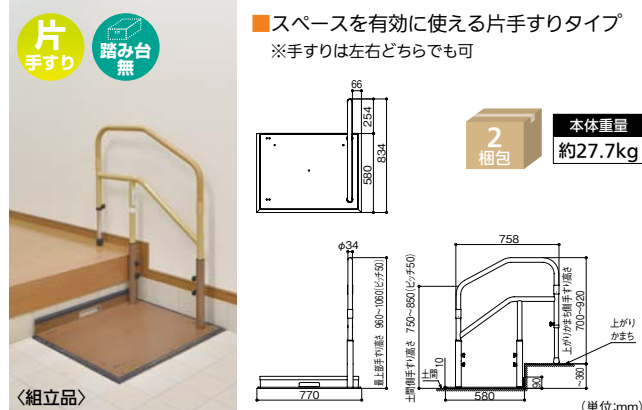


たよレールdan(ロータイプ片手すり踏み台無)

色	商品コード	品番	価格	TAIS
木目ダーク	040-3855	BZD-05WD	1台 73,000円 (税抜き)	01265-000083
木目ナチュラル	040-3865	BZD-05WN		

●付属品: ノブボルト(M6×10) 4個、六角穴付き止めねじ(M8×40) 2本、支柱用硬質樹脂シート(φ45 t1.0) 2枚、支柱固定ねじ(M8×20) 4本、穴隠しキャップ 7個、ゴムワッシャ 4個
 ※六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

ロータイプ BZD-06WD/WN

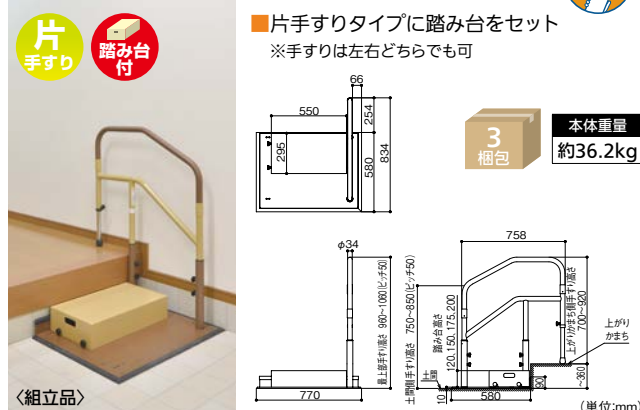


たよレールdan(ロータイプ片手すり踏み台付)

色	商品コード	品番	価格	TAIS
木目ダーク	040-3856	BZD-06WD	1台 96,000円 (税抜き)	01265-000084
木目ナチュラル	040-3866	BZD-06WN		

●付属品: ノブボルト(M6×10) 8個、六角穴付き止めねじ(M8×40) 2本、支柱用硬質樹脂シート(φ45 t1.0) 2枚、支柱固定ねじ(M8×20) 4本、穴隠しキャップ 7個、座金付踏み台固定ねじ(M8×15) 3個、ゴムワッシャ 4個
 ※六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

ロータイプ BZD-07WD/WN

貸与

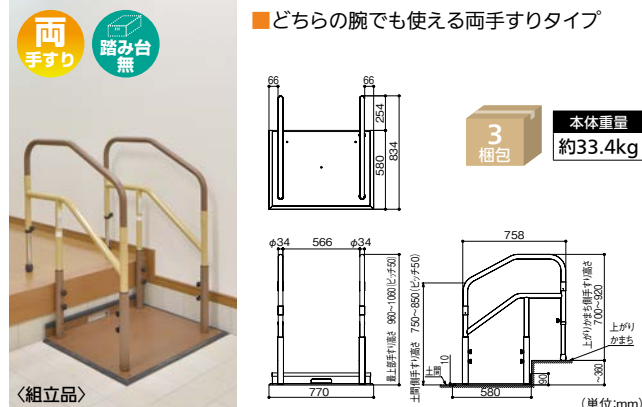


たよレールdan(ロータイプ両手すり踏み台無)

色	商品コード	品番	価格	TAIS
木目ダーク	040-3857	BZD-07WD	1台 113,000円 (税抜き)	01265-000085
木目ナチュラル	040-3867	BZD-07WN		

●付属品: ノブボルト(M6×10) 8個、六角穴付き止めねじ(M8×40) 4本、支柱用硬質樹脂シート(φ45 t1.0) 4枚、支柱固定ねじ(M8×20) 8本、穴隠しキャップ 7個、ゴムワッシャ 8個
 ※六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

ロータイプ BZD-08WD/WN

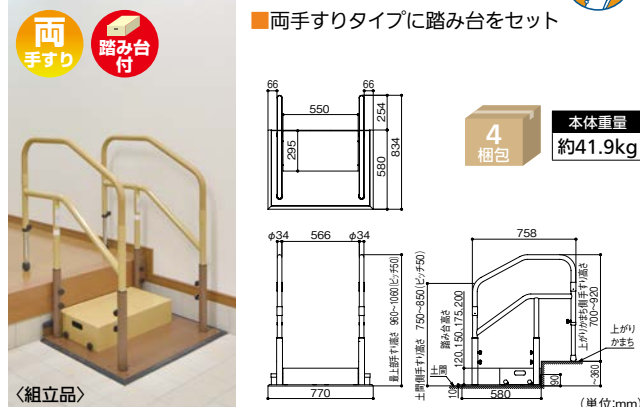

たよレールdan(ロータイプ両手すり踏み台付)

色	商品コード	品番	価格	TAIS
木目ダーク	040-3858	BZD-08WD	1台 136,000円 (税抜き)	01265-000086
木目ナチュラル	040-3868	BZD-08WN		

●付属品: ノブボルト(M6×10) 12個、六角穴付き止めねじ(M8×40) 4本、支柱用硬質樹脂シート(φ45 t1.0) 4枚、支柱固定ねじ(M8×20) 8本、穴隠しキャップ 7個、座金付踏み台固定ねじ(M8×15) 3個、ゴムワッシャ 8個
 ※六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

たよレールdan 省スペースタイプ


Webで詳細図面をご覧ください。

介護 貸与

踏み台付は貸与対象外

狭い玄関に最適な省スペースタイプ

- たよレールdanよりコンパクトなベースを採用した、省スペースタイプです。
- 集合住宅や都心の戸建住宅、京の町屋など玄関のスペースが狭い場合に、限られたスペースを有効活用できます。

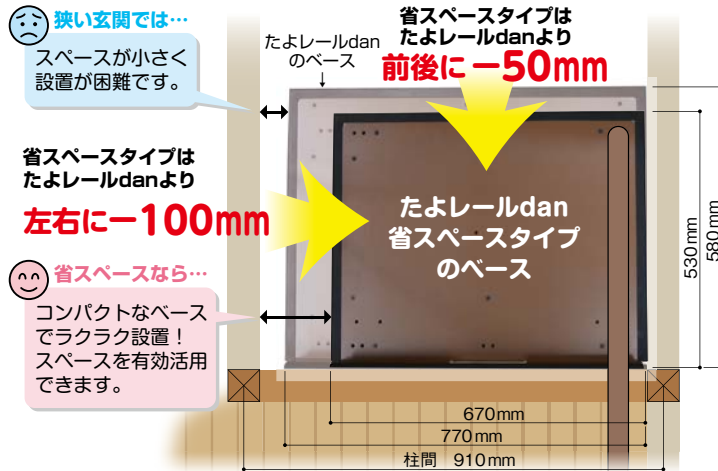

たよレールdan 高さ調整対応表


(単位:mm)

支柱	土間側	上がりかまち側						かまちは 手すり高さ
		90	140	180	240	300	360	
省スペースタイプ	下段	750	870	820	780	720	—	—
	中段	800	920	870	830	770	710	—
	上段	850	—	920	880	820	760	700

●省スペースタイプには、ロータイプ手すりが対応します。


省スペースタイプ BZD-11WD/WN

貸与

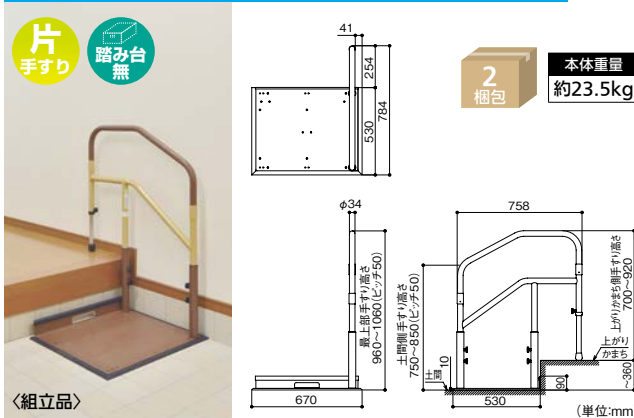

昇り降りの際に
健常側の手で
手すりを握れます。

ベースセンターに
手すりが取付け
できます!!
※省スペースタイプのみ

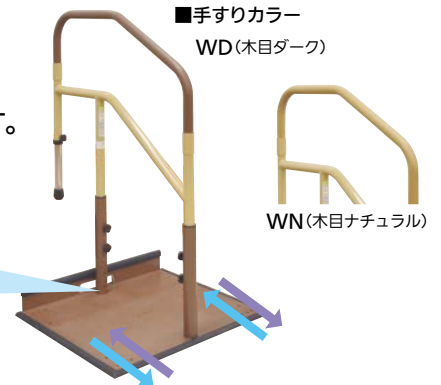

たよレールdan(省スペース片手すり踏み台無)


色	商品コード	品番	価格	TAIS
木目ダーク	040-3961	BZD-11WD	1台 71,000円 (税抜き)	01265-000089
木目ナチュラル	040-3965	BZD-11WN		

●付属品: ノブボルト(M6×10) 4個、六角穴付き止めねじ(M8×40) 2本、支柱用硬質樹脂シート(φ45 t1.0) 2枚、支柱固定ねじ(M8×20) 4本、穴隠しキャップ 7個、ゴムワッシャ 4個
※六角棒スナ(呼び4mm)が別途必要です。

BZD-11~13 共通仕様

- 材質: 手すり/(被膜)ウッドパウダー混合半硬質樹脂(芯材)アルミ、手すりフレーム/スチール焼付塗装、支柱・ベース/スチール焼付塗装、踏み台/スチール焼付塗装
- 色: 手すり/木目ダーク・木目ナチュラル、手すりフレーム/キャメルイエロー、支柱/ダークブラウン、ベースプレート/ダークブラウン、踏み台/キャメルイエロー

省スペースタイプ BZD-12WD/WN

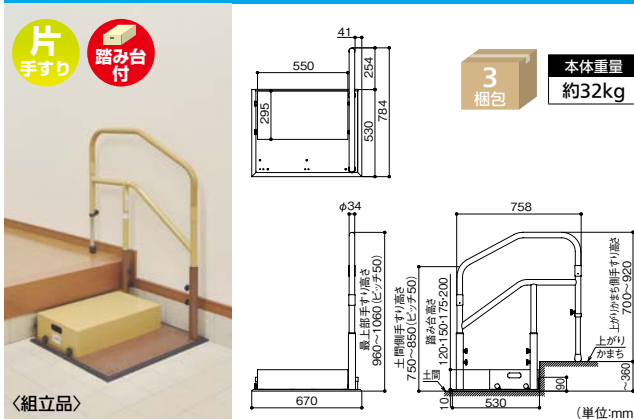


たよレールdan(省スペース片手すり踏み台付)

色	商品コード	品番	価格	TAIS
木目ダーク	040-3962	BZD-12WD	1台 94,000円 (税抜き)	01265-000090
木目ナチュラル	040-3966	BZD-12WN		

●付属品: ノブボルト(M6×10) 8個、六角穴付き止めねじ(M8×40) 2本、支柱用硬質樹脂シート(φ45 t1.0) 2枚、支柱固定ねじ(M8×20) 4本、穴隠しキャップ 7個、座金付踏み台固定ねじ(M8×15) 3個、ゴムワッシャ 4個
※六角棒スナ(呼び4mm)が別途必要です。

省スペースタイプ BZD-13WD/WN

貸与

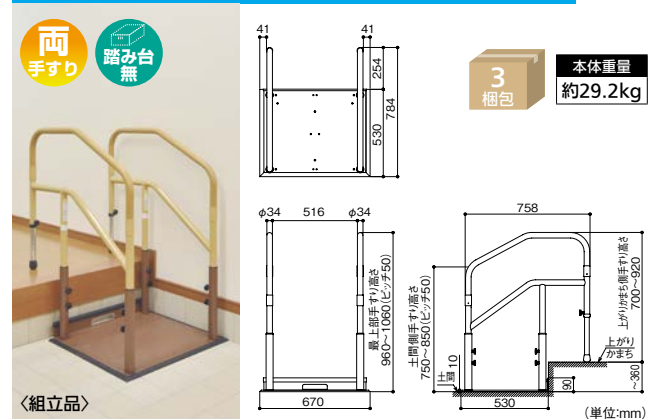


たよレールdan(省スペース両手すり踏み台無)

色	商品コード	品番	価格	TAIS
木目ダーク	040-3963	BZD-13WD	1台 111,000円 (税抜き)	01265-000091
木目ナチュラル	040-3967	BZD-13WN		

●付属品: ノブボルト(M6×10) 8個、六角穴付き止めねじ(M8×40) 4本、支柱用硬質樹脂シート(φ45 t1.0) 4枚、支柱固定ねじ(M8×20) 8本、穴隠しキャップ 7個、ゴムワッシャ 8個
※六角棒スナ(呼び4mm)が別途必要です。

調整プレート

- ベースプレートの裏面に貼付けすることで床の不陸にも対応
- 磁力で貼付くので取付けが簡単です。
- 床の不陸に合わせて重ねてご使用ください。

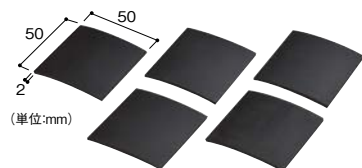

調整プレート (5枚入)


040-3881 BZDO-01

1セット 2,500円 (税抜き)

●材質: 樹脂混合マグネットシート

踏み台

- 踏み台高さ: 120~200mm ※4段階調整 (120・150・175・200)
- ノブボルトでかんたんに高さ調整可能
- 安心のすべり止め加工

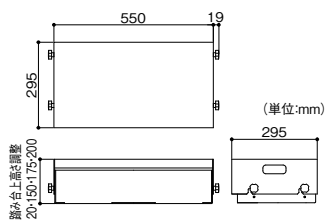

踏み台


040-3876 BZD-F200

1台 23,000円 (税抜き)

●材質: スチール焼付塗装 ●色: キャメルイエロー
●付属品: ノブボルト (M6×10) 4個、座金付踏み台固定ねじ (M8×15) 3個 ●耐荷重: 100kg

TAIS 01265-000182

- 2段式の高さ調整機能付で500mmの上がりかまち高さまで対応
対応かまち高さ: 250~500mm

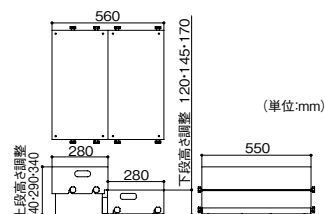

2段踏み台

040-3877 BZD-FW340

1台 49,000円 (税抜き)

●材質: スチール焼付塗装 ●色: キャメルイエロー
●付属品: ノブボルト (M6×10) 8個、座金付踏み台固定ねじ (M8×15) 7本、ブッシュリベット8個
●耐荷重: 100kg

TAIS 01265-000138

- マット付なのですべりにくく土足での歩行が可能です。

※2段踏み台 (BZD-FW340) と
2段踏み台マット (BZDO-05M) のセット商品です。



2段踏み台マット付

040-3968 BZD-FW340M

1台 55,600円 (税抜き)


●材質: 本体/スチール焼付塗装、マット/塩ビ
●色: 本体/キャメルイエロー、マット/ダークブラウン
●付属品: ノブボルト (M6×10) 8個、座金付踏み台固定ねじ (M8×15) 7本、ブッシュリベット8個 ●耐荷重: 100kg

TAIS 01265-000189

本体重量
約18.9kg

ベースプレート用マット


- 表面の凸凹によりすべりにくく土足での歩行が可能です。
- ずれ防止のマグネット付。

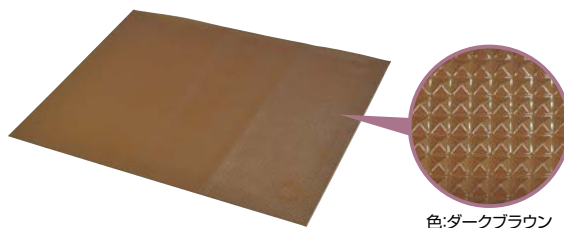

色: ダークブラウン

BZDO-02M

(マグネットシート付)

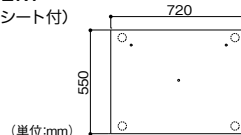

ベースマットM

040-3906 BZDO-02M


1枚 4,800円 (税抜き)

●材質: マット/塩ビ、マグネットシート付
●色: ダークブラウン

TAIS 01265-000186

BZDO-04M 省スペース用

(マグネットシート付)

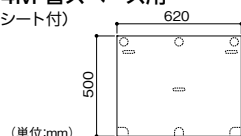

省スペースベースマットM

040-3908 BZDO-04M

1枚 4,800円 (税抜き)

●材質: マット/塩ビ、マグネットシート付
●色: ダークブラウン


TAIS 01265-000188

踏み台マット

- 不織布製は、はだしで踏んだ際にもやわらかく、冷たさを感じません。
- 塩ビ製は表面の凹凸によりすべりにくく土足での歩行が可能です。

BZDO-03

(不織布)

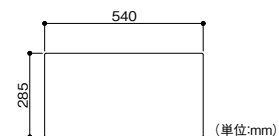

踏み台マット


040-3903 BZDO-03

1枚 1,400円 (税抜き)

●材質: マット/ポリエステル、吸着面/アクリル系吸着材

BZDO-03M

(塩ビ、マグネットシート付)

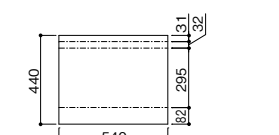

踏み台マットM

040-3907 BZDO-03M


1枚 3,300円 (税抜き)

●材質: マット/塩ビ、マグネットシート付
●色: ダークブラウン

TAIS 01265-000187

BZDO-05M

(塩ビ、マグネットシート付)

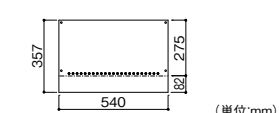

2段踏み台マット (2枚入)

040-3912 BZDO-05M

1セット 6,600円 (税抜き)


●材質: マット/塩ビ、マグネットシート付
●色: ダークブラウン

たよレール用メンテナンス部品一覧は
Webサイトでご確認いただけます。

https://www.mazroc.co.jp/catalog/pdf/tayo_mainte.pdf



BZD-01/03/05/07(踏み台無) + ベースマット・2段踏み台・わたレール

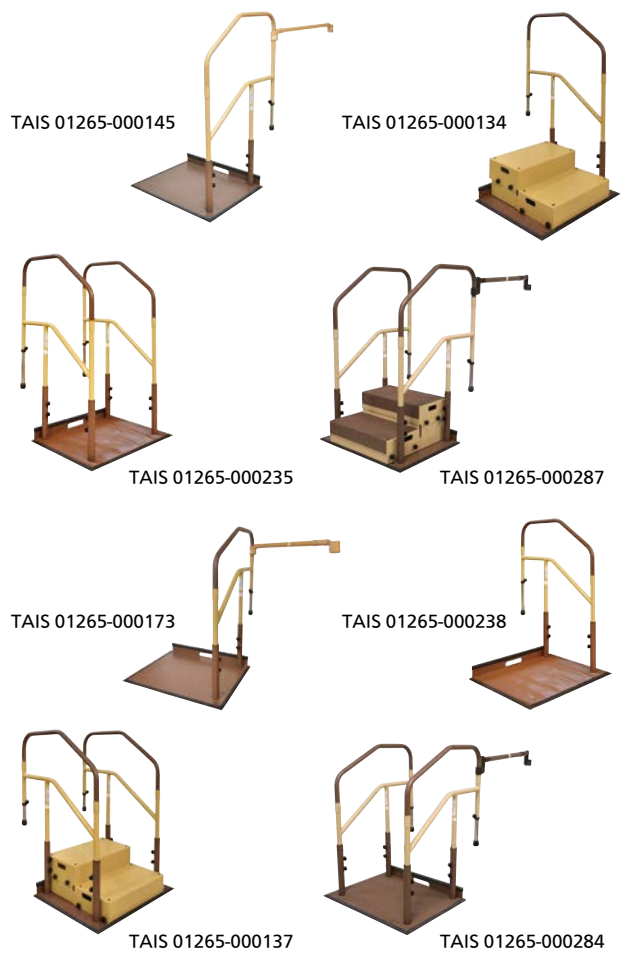

本 体	ベースマット	2段踏み台	わたレール	TAIS	貸与 マーク
BZD-01 WD/WN	—	—	BZW-900NH	01265-000145	貸与
	—	—	BZW-9070EH	01265-000171	貸与
	—	BZD-FW340	—	01265-000134	—
	BZDO-02M	—	—	01265-000233	貸与
		BZD-FW340M	—	01265-000245	—
		—	わたレールEK [®]	01265-000278	貸与
BZD-03 WD/WN	—	—	BZW-900NH	01265-000146	貸与
	—	—	BZW-9070EH	01265-000172	貸与
	—	BZD-FW340	—	01265-000135	—
	BZDO-02M	—	—	01265-000235	貸与
		BZD-FW340M	—	01265-000236	—
		—	わたレールEK [®]	01265-000280	貸与
BZD-05 WD/WN	—	—	BZW-900NH	01265-000147	貸与
	—	—	BZW-9070EH	01265-000173	貸与
	—	BZD-FW340	—	01265-000136	—
	BZDO-02M	—	—	01265-000238	貸与
		BZD-FW340M	—	01265-000297	—
		—	わたレールEK [®]	01265-000282	貸与
BZD-07 WD/WN	—	—	BZW-900NH	01265-000148	貸与
	—	—	BZW-9070EH	01265-000174	貸与
	—	BZD-FW340	—	01265-000137	—
	BZDO-02M	—	—	01265-000240	貸与
		BZD-FW340M	—	01265-000298	—
		—	わたレールEK [®]	01265-000284	貸与

※わたレールEKは品番がBZW-7057EK、BZW-9070EK、BZW-1290EKのいずれか。
(BZW-1612EKは含みません)

BZD-02/04/06/08(踏み台付) + ベースマット・踏み台マット・わたレール



本 体	ベースマット	踏み台マット	わたレール	TAIS	貸与 マーク
BZD-02 WD/WN	BZDO-02M	BZDO-03M	—	01265-000234	—
			わたレールEK [®]	01265-000279	—
BZD-04 WD/WN	BZDO-02M	BZDO-03M	—	01265-000237	—
			わたレールEK [®]	01265-000281	—
BZD-06 WD/WN	BZDO-02M	BZDO-03M	—	01265-000239	—
			わたレールEK [®]	01265-000283	—
BZD-08 WD/WN	BZDO-02M	BZDO-03M	—	01265-000241	—
			わたレールEK [®]	01265-000285	—

※わたレールEKは品番がBZW-7057EK、BZW-9070EK、BZW-1290EKのいずれか。
(BZW-1612EKは含みません)

BZD-11/12/13(省スペースタイプ) + 関連商品



本 体	ベースマット	踏み台マット	2段踏み台	TAIS	貸与 マーク
BZD-11 WD/WN	—	—	BZD-FW340	01265-000196	—
	BZDO-04M	—	—	01265-000242	貸与
BZD-12WD/WN	BZDO-04M	BZDO-03M	—	01265-000243	—
BZD-13WD/WN	BZDO-04M	—	—	01265-000244	貸与

■TAISコードは、公益財団法人テクノエイド協会のHP(<https://www.techno-aids.or.jp/>)でご確認いただけます。

■TAISコードは、介護保険の福祉用具貸与(レンタル)サービスを利用する際、請求書に記入します。(各市町村により、コード記入の必要がない場合もございます。)

■TAISコードは、商品の組合せにより異なります。

■ご注文は商品コード(7桁)をお願いします。

※TAISコードではご注文をお受けできませんのでご注意ください。

⚠ 貸与 マークについてのご注意

● 貸与 マークは、テクノエイド協会が独自に付与しているマークです。介護保険の福祉用具貸与の給付サービスにおいて 貸与 マークの有無を給付判断の基準としている市町村があるため、参考として 貸与 マークを記載しております。

給付の判断は市町村により異なりますので、必ず市町村の担当窓口でご確認ください。



懐かしい日本家屋の
高い上がりかまちには
2段踏み台が最適です。

たよレールdan

BZD-03WD (両手すりタイプ踏み台無)
BZD-FW340M (2段踏み台マット付)

2段踏み台は、2段式の高さ調整機能で
500mmの上がりかまち高さまで
対応できます。



たよレールdan

BZD-03WD (両手すりタイプ踏み台無)
BZD-FW340M (2段踏み台マット付)



▲Before

たよレールdan も対応商品あり!!

アプリも登録も不要!

MAZROC WebAR

スマホ
デモ機



手すりを **実物大で**

**バーチャル
配置!**

さっそくARで
手すりを置いてみる▶▶



例えばこんなとき


重たいデモ機を持って行かなくても、手元にデモ機がない
時でも、設置・施工のイメージやサイズの確認ができます。

昇降をスムーズにする独自の手すり形状

Point ①

長い水平部分

水平部分が段の先端より先まであり、降りるときも前のめりになりにくい。

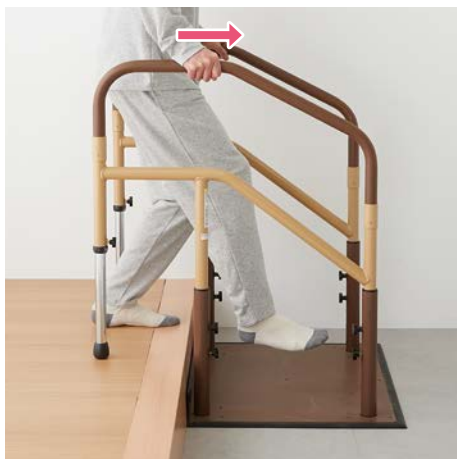


Point ①

Point ②


Point ②

中ざんナシ


昇降動作中に持替えなくてもいいので、手すりが見えにくい姿勢でも安全。

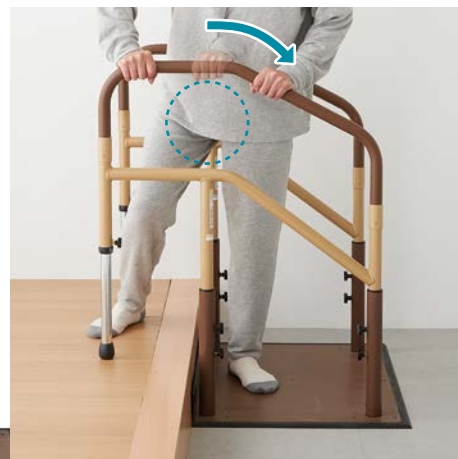

90～500mmまで
(ロータイプは90～360mm)の
上がりかまち高さに対応

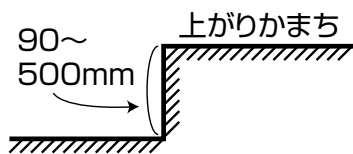

踏み台を併用することで
らくらく昇降

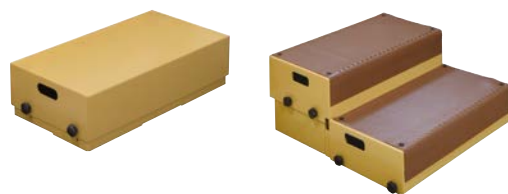

たよレールdan
手すり・踏み台の
組立動画あります



製品動画を
ご覧いただけます。

福祉用具貸与
B-QR08-1



マツ六は製品安全の向上に
取り組んでいます。

PSアワード2024において3度目の経済産業省大臣賞を受賞し、
「製品安全対策ゴールド企業」に認定されました。

弊社の安全・安心への取り組みはWebサイトにてご覧いただけます。
<https://www.mazroc.co.jp/safety/>



代理店

マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL 06-6774-2255 FAX 06-6774-2248
<https://www.mazroc.co.jp/>